



LINHO MULTIFILAMENTAR TORCIDO

Descrição

O fio de sutura do LINHO é uma sutura cirúrgica de origem vegetal a partir da planta do linho, não absorvível, multifilamentar torcido, capilar, de grande maleabilidade e alta resistência tênsil, de cor branca ou bege, preparado a partir de longas fibras – *Linum Usitatissimum*

Indicação:

O fio de sutura de LINHO é indicado para aproximação e/ou ligação dos tecidos em geral, incluindo os procedimentos gastrointestinais.

Ação

O fio de sutura de LINHO possibilita uma reação inflamatória aguda mínima nos tecidos. Por ser um produto capilar potencializa a infecção quando implantado. É um fio cirúrgico de grande maleabilidade, facilita os nós, com bom coeficiente de fricção. Sua perda de tensão é lenta e o encapsulamento é gradual pelo tecido conjuntivo fibroso.

Contra- indicação

O fio de sutura de LINHO é contra indicado em procedimentos onde não haja estímulo à reação inflamatória.

Cuidados/ advertências

Produto de uso único. Não podendo ser re-esterilizado. As embalagens só devem ser abertas no momento do ato cirúrgico e em condições assépticas. Recomenda-se que os usuários estejam familiarizados. O dispositivo só poderá ser utilizado por ou sob orientação do cirurgião segundo técnicas cirúrgicas aplicáveis e só poderá ser manipulado por pessoal qualificado. Descartar produto aberto e não utilizado, descartar sobras e não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou molhada. Na manipulação deste produto deve-se tomar cuidados para que seja feito de modo asséptico. Não utilizar o produto além do prazo de validade.

Precauções

Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material de sutura. Deve-se ter cautela quando da abertura do envelope primário e secundário. Na manipulação desta ou de

qualquer outro tipo de sutura cirúrgica, deve-se tomar cuidado para não danificar a sutura, Evitando o dobramento e esmagamento da sutura por porta-agulhas.

Instruções para uso

O fio de sutura de linho deve ser utilizado conforme as técnicas cirúrgicas desejáveis a critério médico.

Reações adversas

Os efeitos adversos associados ao uso do fio de sutura de linho incluem: Deiscência da ferida, perda gradual da força tênsil, litogenicidade, infecção, irritação no local da ferida.

Conservação

Recomenda-se conservar em temperatura de 18 a 25 °c, ao abrigo da luz solar, calor, livre de poeira e da umidade na embalagem original. A esterilidade do produto é garantida desde que a embalagem esteja intacta. A armazenagem deve estar em ambiente livre de contaminação protegidos de sol e água. Não amassar. Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada. A esterilidade é garantida desde que a embalagem se encontre intacta. As caixas que abrigam o produto devem proporcionar o máximo de segurança contra os riscos de contaminação.

Formas de Apresentação/Tamanhos

O Linho Cirúrgicos está disponível nos tamanhos de 4-0 a 3 e podem vir composto com agulhas cirúrgicas de Aço Inoxidável Atraumáticas em diferentes tamanhos: Agulhas 3/8 de círculo, ½ Círculo, ¼ de Círculo, Agulha Reta e 5/8 de Círculo. Tipos de pontas: Cilíndrica, Triangular convencional, de Corte Invertido, Losangular, Ponta Romba e Espatulada.

A embalagem que contém o fio:

Embalagem primária: Papel Opaline

Embalagem Secundária: Papel Grau Cirúrgico + Filme Laminado de Poliéster.

Selabilidade dos Envelopes:

Os Envelopes de PGC + Filme de Poliéster são selados por Termossoldagem, permitindo abertura asséptica, não proporcionando Delaminação.

Processo de Esterilização:

Gás Óxido de Etileno e/ou Cobalto 60

Processo de Encastamento:

Os fios são encastados nas agulhas por Processo a DRILL.

Quantidade de fios por Caixa:

Caixas com 12, 24 unidades

Validade:

A sutura de Polipropileno, tem validade de 5 (cinco) anos após a data de fabricação.

Certificados de Qualidade :

Os produtos fabricados pela Sutures Índia, são substanciados com creditação de Organismos Internacionais com: FDA, ISO 9001, ISO 13485, WHO, GMP e CE

Registro do Produto no Ministério da Saúde do Brasil:

FABRICANTE

Sutures India Pvt Ltd..
472/D, 4th Phase, 13th Cross, Peenya Industrial Área,
Bangalore, Karnataka – 560 058, (Índia)

IMPORTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO

Mapemi – Brasil Materiais Médicos e Odontológico
Av. Pedro Teixeira, 2240- Dom Pedro – Manaus/AM
CEP.: 69040-000 – Telefone: (92) 3182-4209
CNPJ.: 84.487.131/0001-35
Resp. Legal: Claudio Alberto Felsenthal
Resp. Téc.: Alessandro D.R. Estanqueiro CRF. 1230
e-mail: mapemi@mapemi.com.br

DISTRIBUIDOR EM SÃO PAULO - SP

Vitalhospitalar.com.br